

KaVo Primus™ 1058 Life

Comptez dessus.





Vous pouvez compter sur lui, jour après jour

Le Primus 1058 Life a été conçu en mettant principalement l'accent sur la fiabilité fonctionnelle et l'efficacité économique, pour aujourd'hui et demain. Démontrez que vous savez comment en avoir pour votre argent et rejoignez les milliers de dentistes du monde entier qui confirment que leur Primus 1058 « fonctionne et continue sans cesse de fonctionner ».

Principaux atouts en un seul coup d'œil :

Le fauteuil du patient

1. Design plus épuré du fauteuil en blanc dentaire, plus moderne
2. Charge maximale : jusqu'à 185 kg
3. Position Trendelenburg intégrée pour le confort du patient
4. Positions maximales haute/basse étendues
5. Confort optimisé assuré par la forme de l'assise, sellerie RELAXline en option pour plus de douceur

Les éléments praticien et assistant

6. Élément praticien dans un design moderne
7. Concept d'exploitation simple avec des boutons de sélection plus directs
8. L'élément assistant comprend un clavier à touches à effleurement clairement structuré pour un meilleur confort de l'opérateur

Communication avec le patient

9. Caméra intraorale KaVo ERGOcam One et KaVo DIAGNOcam
10. De nouveaux écrans à haute résolution KaVo, 19" et 22"
11. Le nouveau logiciel système CONEXIO combine le logiciel de gestion du patient, une archive de rayons X en 2D et des images intraorales en direct selon un concept de fonctionnement sans équivalent.

** Produit non présenté sur l'image*







La version fouets

Une grande longueur de cordon avec un support hygiénique.
Les Instruments bien équilibrés restent parfaitement en place dans votre main.



La version cart

Davantage de mobilité combinée avec un fonctionnement simple. Poussez simplement votre cart vers le côté quand c'est nécessaire.

L'élément praticien facile à utiliser : simplification sophistiquée

Peu importe que vous effectuiez le traitement assis ou debout, l'élément praticien de votre Primus 1058 Life vous soutien par son ergonomie perfectionnée. Vous évitez tout étirement et toute torsion. L'accès optimisé garantit des processus efficaces.

La version cordons pendants

Encore plus de liberté de mouvement pour une technique de travail ergonomique dans n'importe quelle position de traitement

Utilisez MEMOSpeed pour réafficher de manière rapide et fiable les paramètres sauvegardés pour chaque pièce à main.



Simple, parfaitement conçu pour vous

Configurez votre élément praticien pour l'adapter parfaitement à vos exigences. Vous pouvez configurer les emplacements pour chacun des 5 Instruments et même y apporter des modifications par la suite. Cela vous donne de la flexibilité pour l'avenir.

Aucune déviation. Droit au but

Vous gagnerez un précieux temps grâce à des boutons d'accès directs pour les fonctions automatiques. Vous conservez la clarté avec le clavier et l'écran intégré.

Un endroit pour vous sentir à l'aise. Une détente pure.

Les patients qui se sentent à l'aise sur le fauteuil dentaire sont davantage détendus et bougent moins, si bien que vous pouvez vous concentrer pleinement sur leur traitement. La nouvelle sellerie souple RELAXline et la forme ergonomique de l'assise sont spécialement conçus pour vous y aider.



Nouvelle sellerie souple KaVo RELAXline.

Une sellerie à mémoire de forme extrêmement confortable enveloppée d'un tissu souple qui ressemble à du cuir, dans d'élégantes couleurs et avec un design cousu main, contribue au positionnement détendu du patient – même pendant de longues sessions de traitement.

Bon pour vous. Bon pour vos patients.

En fonction des besoins individuels du patient. La sellerie à bouton rotatif et la tête à double articulation vous permettent de trouver la position adéquate pour que votre patient s'incline parfaitement et pour que vous puissiez travailler efficacement.




Dossier Progress : position de travail correcte et accès optimal pour le dentiste



Tout simplement confortable : la tête à double articulation peut être maniée d'une seule main et dispose d'un coussin réversible.

Idéal pour toutes les exigences

Vous pouvez configurer le KaVo Primus 1058 Life selon vos exigences et pratiques personnelles. La hauteur du fauteuil du patient, qui peut être modifiée en continu entre 350 mm et 830 mm, garantit des conditions ergonomiques optimales, que vous traitiez le patient assis ou debout.

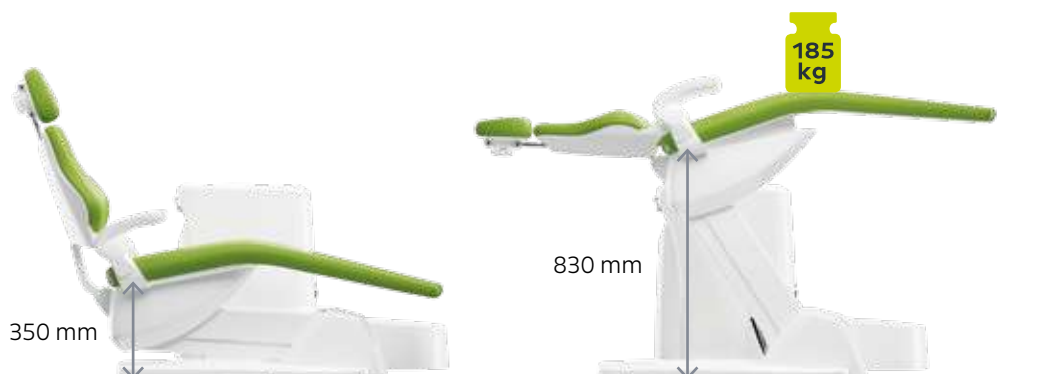

Fauteuil COMPACT

Crée un point d'entrée et de sortie confortable pour les patients les moins mobiles. Le fauteuil KaVo COMPACT se plie au niveau du genou et du dossier. Cela crée aussi un environnement de traitement plus intime, qui vous permet de conseiller vos patients pendant qu'ils sont assis et ensuite les traiter pendant qu'ils sont en position couchée.

Bénéficiez d'une flexibilité accrue.



Gardez vos mains libres pour un travail efficace.

Moins vous touchez à l'équipement, plus vous pouvez travailler de manière hygiénique. Gérez simplement avec votre pied les fonctions de vos instruments et de votre fauteuil – une précaution efficace contre la contamination croisée. Activez la commande au pied de votre Primus 1058 Life horizontalement plutôt que verticalement comme une pédale d'accélérateur. À long terme, cela détend les muscles de vos jambes et vous permet de travailler de manière parfaitement détendue.

Votre assistante a tout sous contrôle.

Appréciez une coopération impeccable avec vos assistantes dentaires. Votre flux de travail sera soutenu de la meilleure façon possible par un élément assistante qui peut être positionné individuellement. Vous pourrez y retrouver le concept des boutons d'accès direct.



Vous pouvez facilement changer de côté.

Si vous êtes un praticien gaucher ou si vous effectuez le traitement tout seul, alors vous apprécierez l'élément assistante pivotant droit/gauche. Il met en valeur par la grande liberté de mouvement de la large amplitude de pivotement ainsi que par le réglage de la hauteur.

Gauche ou droite ? Toujours correct !

Le Primus 1058 Life est disponible en version pour gaucher ou pour droitier. Découvrez le summum de flexibilité et de sécurité de l'investissement avec votre Primus 1058 Life. Peu importe votre choix, vous pouvez l'adapter à votre convenance.



Ergonomie et confort en parfaite harmonie : le KaVo PHYSIO Evo

Il est particulièrement important pour les dentistes d'adopter une position saine et confortable dans chaque situation de traitement. Rien n'influence votre position davantage que le siège opérateur sur lequel vous êtes assis jour après jour. Voilà pourquoi les KaVo PHYSIO Evo et Evo F sont spécifiquement adaptés aux exigences et aux processus de travail des dentistes et de leurs assistantes.



L'ergonomie cachée dans les détails

Grâce aux fonctions de réglage séparées, l'assise du siège et le dossier peuvent être adaptés individuellement à vos besoins anatomiques et votre style de traitement personnel. Les coussins du dossier et du siège du KaVo PHYSIO Evo ont des formes ergonomiques. L'élévation centrée de l'assise offre un siège stable et empêche le praticien de glisser, même en cas de mouvement de roulis brefs et rapides. L'appui fémoral arrondi apporte une grande liberté de mouvement.

Grâce au dossier monté sur ressorts, les muscles du dos – en particulier l'épine lombaire – sont activement soutenus en permanence et donc ménagés à long terme. Un processus de travail impeccable et le meilleur confort d'assise possible deviennent donc des éléments incontournables de chaque traitement.


Un concept exceptionnel

Le siège opérateur KaVo PHYSIO Evo a été récompensé par un label qualité de l'association allemande « Campagne en faveur de dos plus sains » (AGR). Une commission multidisciplinaire d'experts indépendants attribue cette distinction sur la base de rigoureux critères d'évaluation portant sur l'ergonomie et la santé.



Un équipement permettant de passer une journée plus efficace dans le cabinet

Démarrez chaque journée avec d'excellentes options d'équipements. La large gamme d'équipement du Primus 1058 Life propose des solutions qui valent totalement la peine.

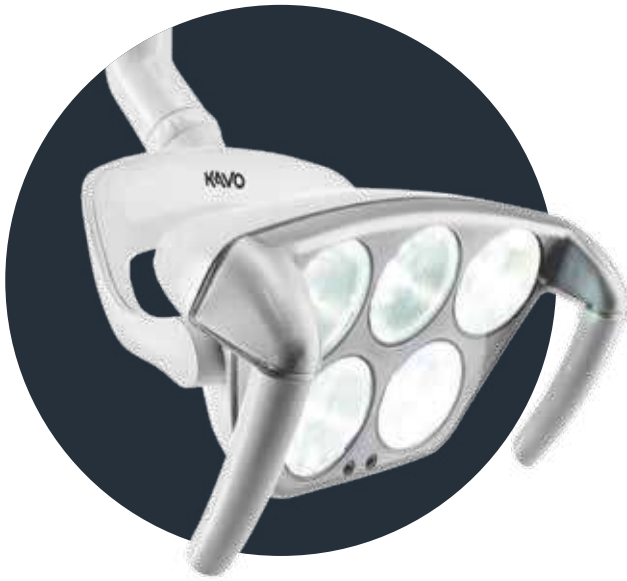

L'innovant mode COMPOSsave, filtre les composantes bleues de la lumière et ralentit ainsi la polymérisation indésirable des composites.

Présentez votre cabinet sous la meilleure lumière.

Comptez sur la lumière LED 5 étoiles du KaVoLUX 540. Une lumière blanche naturelle de la plus haute qualité, qui apporte en même temps une contribution significative à l'hygiène du cabinet. Cette lumière peut être allumée et éteinte et activée sans contact, même en mode COMPOSsave™. Elle a un boîtier scellé, des surfaces lisses et des poignées amovibles.



Éclairage opératoire MAIA LED



Les rayons X intraoraux sont toujours à porté de main

Vous pouvez également installer le KaVo FOCUS™ sur la colonne du scialytique avec un adaptateur : vous pourrez alors créer des images de radiographie adaptées de manière optimale à l'indication radiologique, directement sur l'unité de traitement : de manière extrêmement précise, en gagnant du temps et juste à côté du patient.

Les meilleures performances à votre disposition

Découvrez ce que des moteurs peuvent faire. Des plages de vitesse de 100 à 40 000 tr/min à un ratio de transmission de 1:1.



KaVo INTRA LUX KL 701 LED :

Design compact, faible poids. Peu d'entretien et fiabilité élevée.

KaVo INTRA LUX KL 703 LED :

Encore plus petit et plus léger avec une répartition parfaite du poids. Une puissance infinie. Il vous permet de travailler sans fatigue.



Deux détartreurs pour obtenir une large gamme d'inserts sur votre unité de traitement.


Avec la pièce à main à ultrasons PiezoLED, vous pouvez détartre plus rapidement et plus commodément. Les sonotrodes au titane à vibrations linéaires garantissent un traitement d'une grande efficacité. Les dents et les gencives n'en sont pas affectées, même dans les zones fines, puisque les émissions de lumière circulaire vous apportent une visibilité optimale, et vous pouvez travailler sans fatigue grâce au design clair et ergonomique.

Le KaVo SONICflex est un véritable équipement polyvalent grâce à la diversité de ses capacités. Avec plus de 50 inserts qui peuvent être remplacés par une simple rotation, il ne tardera pas à devenir l'un de vos instruments les plus polyvalents et appréciés. Utilisez le KaVo SONICflex pour la prophylaxie, l'endodontie, la parodontie, le traitement minimalement invasif des caries, la chirurgie et la préparation.

CONEXIO connecte ce qui va ensemble.



Vous pouvez gérer commodément la communication avec votre patient depuis l'élément praticien et ajouter directement de nouvelles images au dossier numérique du patient. Le Primus 1058 Life se combine avec CONEXIO pour vous offrir de nouvelles opportunités.

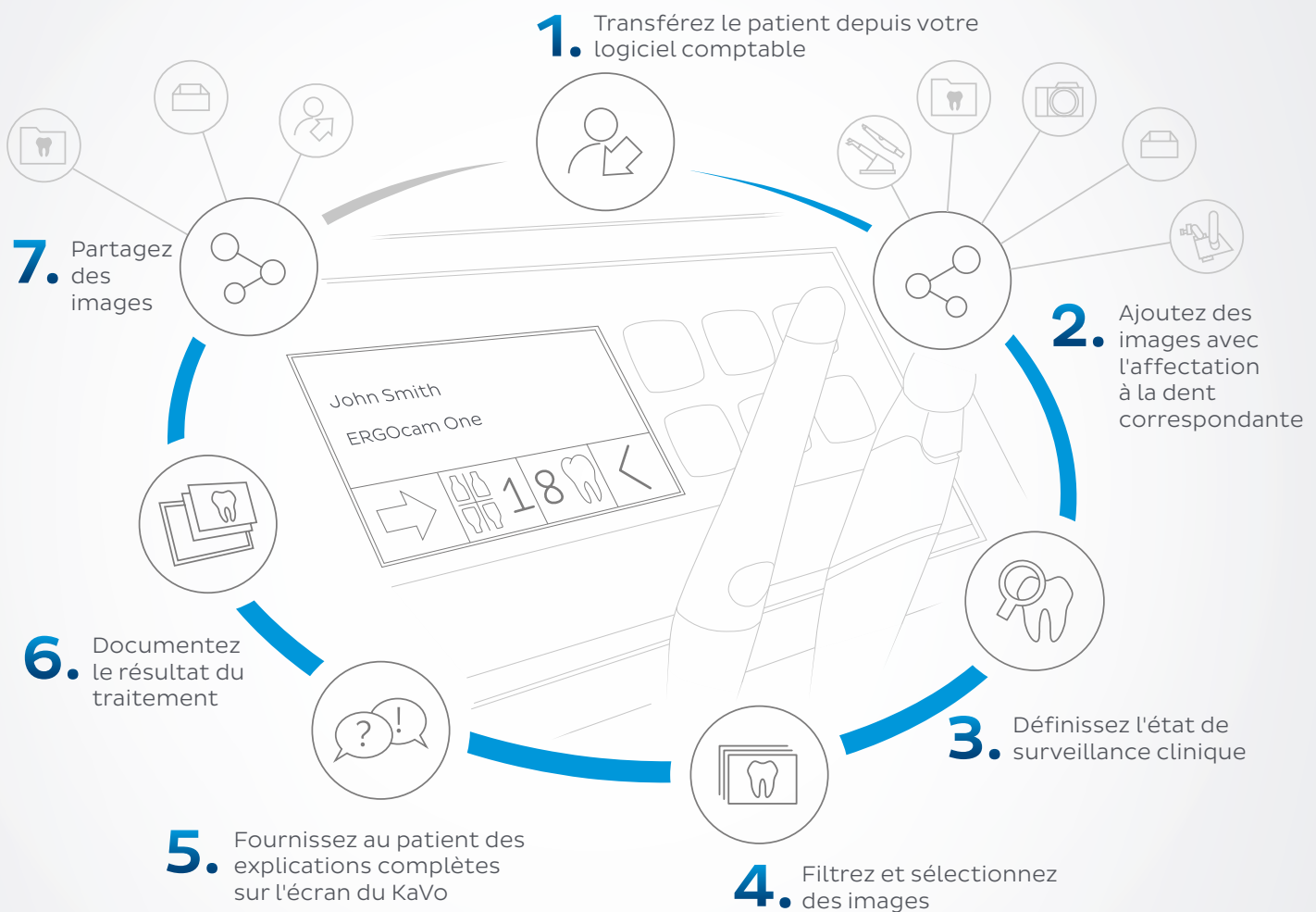

Un aperçu parfait : l'état de surveillance clinique

Chaque image est affectée à une dent spécifique du patient dans l'examen. Cela signifie que vous pouvez définir un état de surveillance clinique entre « sain » et « critique ». Le mode de comparaison vous offre la possibilité d'effectuer un contrôle chronologique, même pendant le diagnostic, en utilisant des images plus anciennes de la dent ou même des images de différentes sources.

ONE
EFFICACE.
FLUX DE TRAVAIL

Passez du mode de traitement au monde des images numériques et revenez par un seul clic à l'élément praticien. CONEXIO simplifie le flux de travail pour le dentiste, sans qu'une souris ou un clavier soient nécessaires.



KaVo DIAGNOcam. Des années-lumière d'avance sur les caries

Les capteurs intraoraux et les équipements radiographiques en 2D ou 3D ne révèlent souvent les caries qu'une fois qu'elles atteignent la dentine. KaVo DIAGNOcam est l'adjonction idéale à la détection traditionnelle des caries. Elle vous permet de détecter les caries approximales et occlusales beaucoup plus tôt et plus facilement. Sans les distortions provoquées par les dépôts de plaque ou le chevauchement, visualisez la structure de la dent et les caries avec une clarté impressionnante – sans aucune attente et sans rayons X, et directement sur le poste de traitement.

KaVo ERGOcam One – une petite caméra avec de grandes capacités

Illustre la situation dentaire actuelle de vos patients en utilisant les images de la KaVo ERGOcam One. Elle offre une grande profondeur de champ et une remarquable reproduction des couleurs.



Montrez-le à vos patients.

L'écran affiche une qualité d'image à haute résolution, des valeurs de contraste convaincantes et une brillante reproduction de couleurs.

KaVo Screen One

Écran plat HD-True

- Rapport hauteur/largeur : 16:9
- Diagonale d'écran : 19 pouces
- Deux entrées numériques (microscope et PC)

KaVo Screen HD

Écran plat Full HD-true

- Rapport hauteur/largeur : 16:9
- Diagonale d'écran : 22 pouces
- Deux entrées numériques (microscope et PC)





Hygiène moderne : commode et sûre

Votre Primus 1058 Life est très facile à nettoyer. Les principaux composants tels que le tapis en silicone, le plateau des pièces à main, la console du bras pivotant et le bol du crachoir se détachent facilement pour être désinfectés. Toutes les surfaces et pièces salies sont faciles à nettoyer.



La réduction permanente des germes avec adjonction de KaVo OXYGENAL 6 limite la prolifération des algues et des germes. Des surfaces lisses et des couvercles de protection amovibles, ainsi que des plateaux de pièces à main, facilitent le nettoyage. Grâce aux poignées hygiéniques, les filtres d'aspiration peuvent être aisément remplacés en toute sécurité.



Protégez les tuyaux de l'eau souillée.

Le support pour décontamination intensive répond aux critères les plus élevés de la norme DVGW. Par ailleurs, la réduction continue des germes avec KaVo OXYGENAL 6 garantit une diminution permanente des bactéries et des germes. Avec le programme de décontamination intensive, vous protégerez vos patients contre les micro-organismes qui peuvent se former et se développer lors de moments de longue stagnation, par exemple pendant les week-ends ou les vacances.

Réduisez les risques en utilisant le programme de rinçage RKI.

Répondez aux exigences des directives RKI actuelles. Votre Primus 1058 Life effectue un rinçage standardisé et automatique des instruments au début de la journée de travail et après le travail sur chaque patient.

La force de nettoyage de l'eau – HYDROclean

Lancez le programme automatisé HYDROclean pour le nettoyage du séparateur de l'amalgame, les systèmes d'aspiration et de vidange de votre unité de traitement avec de l'eau. Réduisez les temps d'attente et les coûts de maintenance.

Une protection améliorée grâce à un effet d'aspiration rétractive plus doux.

Un arrêt automatique de l'aspiration sur les instruments et moteurs KaVo empêche l'eau pulvérisée contaminée d'être aspirée dans l'unité de traitement. Par conséquent, le système d'alimentation en eau est protégé de manière fiable.





Gagnez du temps avec le Gel KaVo DEKASEPTOL mélangé et prêt à l'emploi. Ce gel humidifie les tuyaux d'aspiration et les systèmes d'aspiration et adhère aux zones contaminées au lieu de les traverser tout simplement.




La qualité est payante

Il a fait ses preuves au fil du temps, avec plus de 45 000 unités vendues. Le Primus 1058 a toujours été conçu pour un travail soutenu. Des composants de haute qualité qui sont parfaitement adaptés les uns aux autres sont traités avec une précision extrême en vue de cette utilisation. L'ensemble de l'unité, de la plus petite vis jusqu'au corps de l'unité complète, est conçu pour une sollicitation et une durabilité maximales. Nos produits font l'objet de tests complets pour garantir qu'ils résistent à leur charge de travail quotidienne, ce qui contribue à éviter les pannes ou d'autres complications coûteuses et vous permet de compter sur nous à l'avenir.


Peinture de couleur métallique

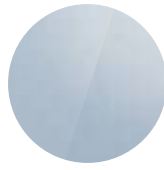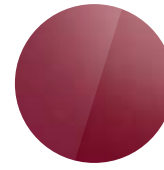Bleu nuit
métalliqueBleu fumée
métalliqueBleu argenté
métalliqueArgenté
métalliqueBaie
métalliqueRouge
pourpre
métalliqueChocolat
métallique


Peinture de couleur simple

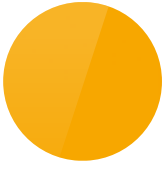

Orange

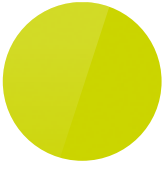

Vert pomme

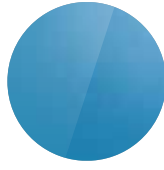


Bleu Océan




Blanc dentaire

Les couleurs présentées ne sont pas forcément fidèles à l'original en raison des limitations de la reproduction. (Veuillez commander le nuancier KaVo)


Couleurs du garnissage

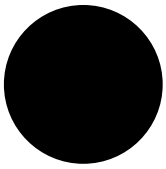


Noir

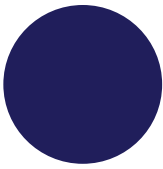

Bleu nuit

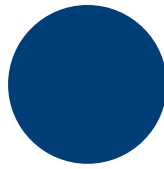

Bleu fumée

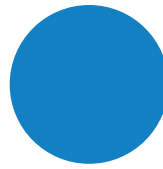


Bleu Océan




Menthe




Greenery

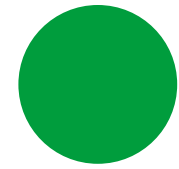


Vert émeraude

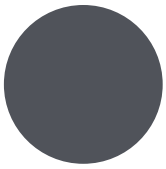



Anthracite

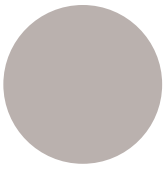


Gris perle

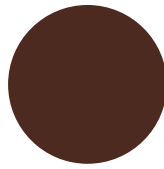


Chocolat

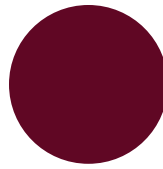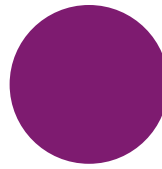Rouge
pourpre


Baie

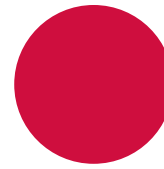

Rouge rubis

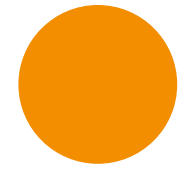


Orange

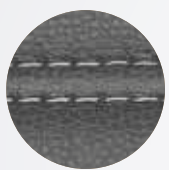Nouvelle sellerie souple
KaVo RELAXline.

Graphite



Cachemire

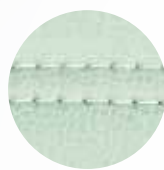

Agave

Édition Greenery



Greenery

Options d'équipements

	TM	S	Cart
Fauteuil du patient			
Standard	●	●	●
Fauteuil COMPACT	○	○	○
Garnissage moelleux	●	●	●
Nouvelle sellerie souple KaVo RELAXline	○	○	○
Dossier			
Progression	●	●	●
Confort ²	○	○	○
Appui-tête			
Appui-tête	○	○	○
à double articulation et roue rotative	●	●	●
à double articulation avec bouton poussoir	○	○	○
Accoudoir			
Droite	○	○	○
Gauche	○	○	○
Élément praticien			
Tuyau de turbine	○	○	○
Moteur KL 701	○	○	○
Moteur KL 703 LED™	○	○	○
Pièce à main à triple fonction	○	○	○
Seringue Multifonction	○	○	○
COMFORTdrive™	○	○	○
SMARTdrive™	●	●	●
Détartreur à ultrasons PiezoLED™	○	○	○
Détartreur à ultrasons SONICflex™	○	○	○
Indication rel. d'écran MemoSPEED	○	○	○
Visualiseur de rayons X Panoramique ⁴ (monté sur un montant d'éclairage)	○	○	○
Visualiseur de rayons X Panoramique	-	-	○ ³
Support de plateau pour plateau US	x	x	○
Support de plateau pour 1 seul plateau standard	x	-	x
Support pour deux plateaux standard	○	○	-
Chauffage à pulvérisation pour instruments	○	○	○
Touche de fonction « cloche »	○	○	○
Communication avec le patient			
KaVo Screen One	○	○	○
KaVo Screen HD	○	○	○
CONEXIO™	○	○	○
Caméra intraorale KaVo ERGOcam™ One	○	○	○
KaVo DIAGNOcam™	○	○	○

	TM	S	Cart
Élément assistante			
Aspiration du brouillard de spray	●	●	●
Éjecteur de salive	●	●	●
2ème éjecteur de salive	○	○	○
Pièce à main à triple fonction	○	○	○
Pièce à main multifonction	○	○	○
Lumière de durcissement Satelec MiniLED	○	○	○
Support pour porte-plateau	○	○	○
Pivotement droite/gauche et réglable en hauteur élément assistant	●	●	●
Pivotement droite/gauche et réglable en hauteur élément assistant	○	○	○
Guide-tube d'aspiration	○	○	○
Kit de support sélectif	○	○	○
Corps de l'unité			
Bassin de crachoir en porcelaine	x	x	x
Bassin de crachoir en verre	x	x	x
VACUstopp	●	●	●
Réduction permanente des germes ⁵	●	●	●
Réduction intensive des germes ⁶	○	○	○
HYDROclean	●	●	●
Chauffe-eau	○	○	○
Système d'alimentation			
Bloc d'eau DVGW	x	x	x
Bloc d'eau compact	x	x	x
Bouteille d'eau DVGW	x	x	x
Régulateur à basse pression	○	○	○
Raccordement à un appareil extérieur	○	○	○
Système d'évacuation			
Aspiration externe	x	x	x
Séparateur d'amalgame DÜRR	x	x	x
Séparateur automatique DÜRR	x	x	x
Kit collecteur de solides	x	x	x
Divers			
KaVo PHYSIO Evo / Evo F	○	○	○
KaVo PHYSIO One	○	○	○
Éclairage opératoire LED KaVoLUX™ 540	○	○	○
Éclairage opératoire MAIA LED	○	○	○
Barre de fixation de l'éclairage	○	○	○
Adaptateur pour barre de fixation de l'éclairage	○	○	○
Boîtier de service patient	○	○	○
Table de service 1568	-	-	○
Kit de gel de base DEKASEPTOL	●	●	●

● Équipement standard ○ Équipement en option x Doit être sélectionné - Non disponible

1. Pas avec le fauteuil de patient COMPACT
2. Uniquement avec le fauteuil de patient COMPACT
3. Ne convient pas pour être placé sous un plateau de table

4. Pas en liaison avec multimédia
5. Uniquement avec le bloc d'eau DVGW ou la bouteille d'eau DVGW
6. Uniquement en liaison avec le bloc d'eau DVGW