

TRAITEMENT DE L'EAU DE BOUCHE PATIENT

Tous les jours, remplir la bouteille de 2L avec de l'eau déminéralisée additionnée de 20 ml d'ALPRON.



DESINFECTION ET NETTOYAGE BOUTEILLE

1/mois, introduire 100 ml de BC-SAN 100.
Puis, remplir d'eau déminéralisée jusqu'au ras du goulot.
Laissez agir pendant 6h (idéalement la nuit).
Videz et rincez la bouteille avant réutilisation.



DECONTAMINATION INTENSIVE

1/semaine, remplir la bouteille jusqu'à la marque avec le liquide BILPRON.



Avant chaque période d'immobilisation du poste de traitement, comme par ex. avant les week-ends ou les fermetures pour congés, remplir la bouteille jusqu'à la marque avec du liquide BILPRON



Ne jamais remplir la bouteille simultanément avec la solution BILPRON et l'eau de bouche ! Avant l'échange et l'utilisation des bouteilles veuillez les rincer soigneusement à l'eau !



Déclenchez le menu Rinçage sur l'écran tactile



Choisir l'option Rinçage intensif



Message : Débranchez tous les instruments



Insérez les cordons dans le capot de rinçage



Confirmez



Le temps du rinçage intensif est indiqué sur l'écran



Laissez les instruments dans le capot de rinçage. Éteindre le poste de traitement. Une fois remis sous tension, l'appareil passe automatiquement au menu Rinçage. Remplir la bouteille d'eau déminéralisée



Choisir l'option Rinçage normal



Confirmez

↑
max. Bilpron